

「ピップエレキバン」シリーズ使用後の磁石誤飲のご注意

日頃より、ピップ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：松浦由治）の商品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

経済産業省より、磁石製娯楽用品（マグネットセット）についての販売を規制する「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定された旨が2023年5月16日に発表され、6月19日より施行されました。

これを受け、磁石とバンソウコウが一体となった医療機器である「ピップエレキバン」シリーズにおいても、使用後の磁石誤飲について、改めてお客様にご注意いただきたくご案内いたします。

経済産業省ニュースリリース：<https://www.meti.go.jp/press/2023/05/20230516002/20230516002.html>

リリース発表の経緯

まずは、磁石製娯楽用品（マグネットセット）による事故被害を受けた方へ、心よりお見舞いを申し上げます。

当社で製造販売している「ピップエレキバン」シリーズは、磁気ので血行を改善しコリをほぐす磁気治療器として、多くのお客様にご愛顧いただいております。

この「ピップエレキバン」シリーズは、磁石とバンソウコウが一体となった医療機器となっており、磁石とバンソウコウを取り外してのご使用は医療機器の改造行為にあたります。また、ご使用後の磁石とバンソウコウを取り外しての再利用は、お子様やペットの誤飲のリスクがあることと、雑菌などの繁殖による皮膚トラブルのリスクもあることから、ご使用後は廃棄していただくよう、商品添付文書、当社ホームページ、ピップエレキバンブランドサイト等でご案内してまいりました。

[ピップエレキバンブランドサイト「誤飲事故を防ぐためのお願い」](https://elekiban.pipjapan.co.jp/caution/)：<https://elekiban.pipjapan.co.jp/caution/>

しかし、磁石そのものの効果としては永久に変わらず、貼り替え用バンソウコウが一般に流通していることから、取り外して繰り返し使えるとご認識いただいている方も一定数いらっしゃるものと存じます。

誤った使い方による重大な事故が発生することがないように、またお客様に今後も快適に「ピップエレキバン」シリーズをお使いいただけることを願って、改めてご案内させていただきます。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 1. 誤飲を防ぐために使用後は、すぐに捨ててください。**
磁石の再使用はおやめください。
小児および監督を必要とする方が手にとると、誤って磁石をバンソウコウからはずして飲み込むおそれがあります。
- 万一飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。**
磁石が体内で滞留すると、開腹手術が必要になるおそれがあります。

「ピップエレキバン」について

ピンポイントでコリを解消する「ピップエレキバン」。磁気が体内成分に働きかけ血行を良くし、コリの原因となる老廃物を流します。貼っている間中効果が続くので、2～5日間貼ることを推奨します。そのままお風呂にも入れます。磁力の強さを選べるため、コリの状態によって使い分けが可能。こっているな、と思うところを指で軽く押さえ「少し痛い、気持ちいい」と感じる場所に貼ったり、必要に応じてその周囲にご使用ください。



【製品概要】 管理医療機器

効果	装着部位のこり及び血行の改善
販売チャネル	全国のドラッグストア・量販店・ネット通販 など
希望小売価格	オープン価格

製品名	ピップエレキバン80	
医療機器認証番号	225AGBZX00031000	
磁束密度	80ミリテスラ	
展開	全3種（12粒、24粒、48粒）	
製品特長	磁束密度が最も低く、磁気治療器初心者にもおすすめ。	

製品名	ピップエレキバン130	
医療機器認証番号	225AGBZX00030000	
磁束密度	130ミリテスラ	
展開	全4種（12粒、24粒、48粒、72粒）	
製品特長	シリーズで最も支持されている定番人気製品	

製品名	ピップエレキバンMAX200	
医療機器認証番号	228AGBZX00091000	
磁束密度	200ミリテスラ	
展開	全2種（12粒、24粒）	
製品特長	シリーズ最大の磁束密度。大型円錐磁石で広い範囲に磁気が作用 頑固なコりに効く	

製品名	ピップエレキバンfor mama	
医療機器認証番号	228AGBZX00091000	
磁束密度	200ミリテスラ	
展開	全1種（12粒）	
製品特長	目立ちにくいカラー※の磁石を採用 乳幼児が開けにくいパッケージでコリにお困りのママに ※製法により多少の色のバラつきがあります	

販売名
ピップエレキバンMAX200

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

ピップ株式会社お客様相談室 TEL：06-6945-4427

ピップ製品情報ホームページ <https://www.pipjapan.co.jp/products/>

ピップエレキバンブランドサイト <https://elekiban.pipjapan.co.jp/>

Twitter公式アカウント https://twitter.com/pip_cp

ピップ ウェルネス通販 <https://shop.pipjapan.co.jp/shop/default.aspx>

＜本リリース・商品リリースに関するお問い合わせ＞

ピップ PR 事務局（株式会社アンティル内）：川村・岸浪・松下・根本

TEL：03-6821-7863 FAX：03-6685-5265 MAIL：pip-pr@vectorinc.co.jp