


機械器具 81 磁気治療器  
管理医療機器 家庭用永久磁石磁気治療器(71016000)  
ピップマグネループMAX

**【禁忌・禁止】**

心臓ペースメーカー等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、使用しないでください。[誤作動を招くおそれがあるため]

**【形状・構造及び原理等】**

1. 構成  
本体  
添付文書

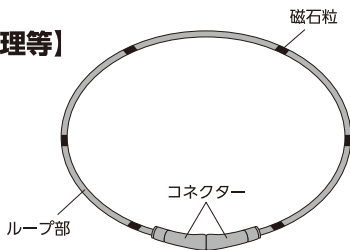

2. 原理

本製品は、線状の磁性粉入りシリコンループ内に磁性材・磁気板を配列し、両端に接続留め具(コネクター)を取り付けたもので、永久磁石による磁気を患部に作用させて治療を行う家庭用永久磁石磁気治療器である。

3. 最大磁束密度

ループ部：55mT (ミリテスラ)  
磁石粒：200mT (ミリテスラ)

**【使用目的又は効果】**

一般家庭での磁気治療に使用する。  
装着部位のこり及び血行の改善

**【使用方法等】**

ご使用にあたっては、説明書をよくお読みになってからご使用ください。また、機器に異常がないか確認してからご使用ください。

1. 使用方法  
首に装着します。

**【使用上の注意】**

1. 医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上ご使用ください。[症状が悪化するおそれがあるため]
- (1) 悪性腫瘍のある方
  - (2) 心臓に障害のある方
  - (3) 妊娠初期の不安定期または出産直後の方
  - (4) 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
  - (5) 皮膚に感染症または創傷のある方
  - (6) 安静を必要とする方

- (7) 体温 38℃以上 (有熱期) の方  
例1. 急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動)の強い時期  
例2. 衰弱しているとき
  - (8) 捻挫、肉離れなどの急性疼痛性疾患の方
2. 使用しても効果が現れない場合は医師などの専門家に相談してください。
3. 機器の取り扱いには次のことにご注意ください。
- (1) 他の治療器と同時に使用しないでください。
  - (2) 頭部には使用しないでください。
  - (3) 機器は改造しないでください。
4. 使用する前には次のことにご注意ください。
- (1) 時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
  - (2) しばらく使用しなかったときには、表面に金属などの異物が吸引付着していないことを確認してください。
5. 使用中には次のことにご注意ください。
- (1) 身体に異常を感じたときは、使用を直ちに中止してください。
  - (2) 装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れたときは、使用を直ちに中止してください。
  - (3) 磁気共鳴画像診断装置(MRI)の検査を受ける方は、検査の前には取りはずしてください。
6. 使用後及び保管には次のことにご注意ください。
- (1) 機器を廃棄するときには、お住まいの市町村の廃棄方法に従ってください。

**【保管方法及び有効期間等】**

1. 小児および監督を必要とする方の手の届かない場所に保管してください。

**【保守・点検に係る事項】**

使用に際し、異物の付着等がないか確認の上ご使用ください。常に使用前後の点検を励行し、機器に異常が発見された場合にはすぐに使用を中止し、弊社お客様相談室までご連絡ください。

**【包装】**

1個入

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元:ピップ株式会社  
住所:奈良県天理市南六条町182番地(奈良工場)  
お問い合わせ先:お客様相談室(説明書参照)  
製造業者:ピップ株式会社  
住所:大阪市中央区農人橋2丁目1番36号

# ピップマグネループ<sup>®</sup>

## MAX 説明書

ご使用の前にこの説明書をよくお読みいただき、  
正しくご使用ください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

### ⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。  
※物的損害とは家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。


1. 首筋に湿疹や傷がある場合は使用しないでください。症状が悪化するおそれがあります。
2. 使用中皮膚や体調に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
3. ご使用のたびに、本体に金属片（針やピンなど）が付着していないか確認してください。  
鋭利な金属片が付着したまま装着すると、けがをするおそれがあります。
4. ループに伸びや膨らみなどの異変を感じたら、使用を中止してください。
5. サウナなど、高温になる場所で使用しないでください。
6. 火気のそばに置かないでください。  
変形するおそれがあります。また、引火すると有毒ガスが発生するおそれがあります。

### お願い


1. 強く引っばらないでください。切れるおそれがあります。
2. 下記のような使用はしないでください。劣化や変色するおそれがあります。  
①クリーム、スプレー、シップなど薬剤と併用 ②入浴剤を入れた風呂への入浴  
③温泉浴 ④海水浴
3. 使用目的以外の用途に使用しないでください。

### ご使用方法


①コネクターを確認してください。

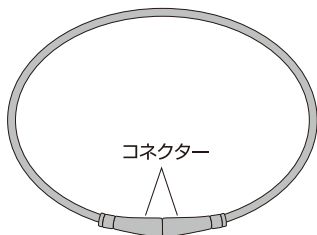

②コネクターを指でしっかりつかみ  
水平に引っばってはずしてください。

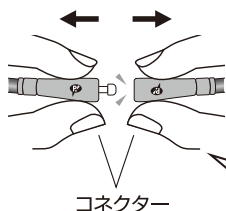

コネクター以外の  
ところをつかんで、  
引っばらないで  
ください。

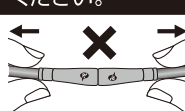

③直接肌に触れるように首に  
装着してください。




④こりの症状が改善したら、  
取りはずしてください。

本製品は、素材の特性上、汗や皮脂などを吸着することがあります。下記の事項をお守りください。

### お手入れ方法

まめに水・ぬるま湯で洗ってください。

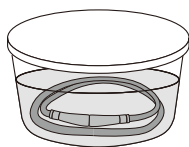


より長く使用するには・・・

消毒用エタノールや中性洗剤に  
つけ置き洗いをしてください。  
2～3日に1度、2～3時間つける  
のがおすすめです。

お手入れ後は、十分な水で  
洗い流してください。

### 買い替え目安

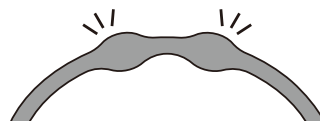

べたつき・伸び・膨らみ・変形が  
見られたら買い替えの目安です。

※使用状況・お手入れ頻度によって、  
開封後から買い替えまでの期間は異なります。



ピップマグネループ  
HPはこちら



お問い合わせ



ピップ株式会社

大阪市中央区農人橋2-1-36  
〒540-0011

お客様相談室

☎(06)6945-4427

土・日・祝日を除く10:00～17:00